

Globasept[®]Wound Sol.

HAAVAHUUHDE

Globasept[®]Wound Sol. sopii akuuttien ja kroonisten pintahaavojen (mm. naarmut, hiertymät, puremat, repeytymät jne.) puhdistamiseen, huuhteluun ja kosteutekseen. Nopeuttaa parantumista haavan puhtauden ansiosta. Haavat tarvitsevat riittävästi kosteutta parantaakseen optimaalisesti, koska ihosolujen on kyettävä jakautumaan ja liikkumaan, jotta paraneminen tapahtuu. Tämä on parasta mahdollista kosteassa haavaympäristössä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- väriaineeton
- Ei kirvele tai aiheuta ärsytystä
- sopii sekä ensiapu- että haavanhoitoon
- sopii myös hyönteisten puremien ja palovammojen (mukaan lukien auringonpolttama) lievittämiseen

KÄYTTÖ

Kostuta tarvittava alue yhtenäisesti ja kokonaan.

Suihkutusmenetelmä (esim. haavojen osalta):

Suihkuta haavasuihketta runsaasti koko alueelle ja tarkista, että pinta on yhtenäisesti kostutettu.

Puhdistuslapulla/sideharsolla puhdistaminen:

Kostuta perusteellisesti riittävä määrä steriilejä puhdistuslappuja ja puhdistu koko tarvittava alue.

Hyönteisten puremat ja auringonpolttama:

Kostuta perusteellisesti riittävä määrä puhdistuslappuja ja puhdistu tarvittava alue.

SÄILYTYS

Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä 5–25 °C:n lämpötilassa suojassa suoralta auringonsäteilyltä.

KIERRÄTYS

Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemärissä biohajoavia. Huuhto pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä.

HUOMAA!

Tuote on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön, ei sovi infuusioon tai injektointiin! Älä niele! Hyvin harvoissa tapauksissa voi esiintyä kevyttä polttelun tunnetta, mutta se menee ohi muutamassa minuutissa. Globasept[®]Wound Sol.-ia ei saa käyttää, jos esiintyy tai epäillään allergiaa mitä tahansa tuotteessa olevaa ainesosaa kohtaan. Tuote ei sovi käytettäväksi väli- tai sisäkorvassa, hyaliinisessa rustokudoksessa eikä silmissä.

Välttä suihkutettavan aineen hengittämistä. Älä käytä yhdistettynä anionisten pinta-aktiivisten aineiden kanssa, koska ne voivat reagoida polyheksanidiin. Koska kliinisiä tutkimuksia tai pitkäaikaista kokemusta raskaana olevien ja imettävien naisten osalta sekä vastasyntyneiden ja vauvojen osalta ei ole, heidän on käytettävä tuotetta vasta huolellisen lääketieteellisen arvon jälkeen. Älä käytä vioittuneessa pakkauksessa olevaa tuotetta. Haavan kanssa kosketuksissa olleet pullot on käytön jälkeen heitettävä pois. Ellei haava ala parantua muutaman päivän kuluessa tai haava-alueella esiintyy turvotusta, kipua tai punoitusta, käänny lääkärin puoleen. Älä käytä jatkuvasti yli yhden kuukauden ajan. Lääketieteellinen valmiste – Säilytettävä lasten ulottumattomissa.


KOOSTUMUS

100g tuotetta sisältää seuraavia aineita: puhdistettu vesi, polyaminopropylibiguanidi (polyheksanidi) 0,1%


Tuotteella on CE-merkintä lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETY mukaisesti



PAKKAUS

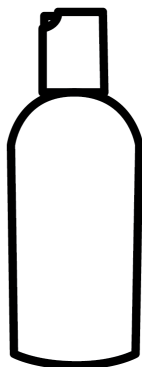

100ml läppäkorkkinen pullo

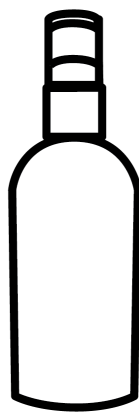

100ml suihkepullo



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

